

## Implantatpflege

- Wenn Sie Ihr neues PiezoImplant richtig pflegen, sollte es Sie für den Rest Ihres Lebens begleiten.
- Achten Sie darauf, dass Sie unmittelbar nach der Operation den Heilungsprozess der Operationsstelle nicht stören. Essen Sie für ein paar Wochen weiche Lebensmittel, während die Wunde heilt, und erlauben Sie sich zusätzliche Ruhe.
- Halten Sie Ihr Implantat sauber, indem Sie eine gute Mundhygiene pflegen. Putzen Sie Ihre Zähne jeden Morgen nach dem Aufwachen und jeden Abend bevor Sie ins Bett gehen mit einer weichen Zahnbürste. Putzen Sie Ihre Zähne außerdem wenn möglich nach jeder Mahlzeit.
- Vermeiden Sie das Rauchen, da dies den Heilungsprozess verlangsamen und die Knochenqualität beeinträchtigen kann.
- Bitten Sie Ihren Zahnarzt um weitere Ratschläge zur Pflege Ihres Implantats und vereinbaren Sie regelmäßige Kontroll- und Hygienetermine.

## MRI-Sicherheitsinformationen

Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass das Rex PiezoImplant bedingt MR-tauglich ist. Das bedeutet, dass Sie in einem MR-System, das die folgenden Bedingungen erfüllt, sicher gescannt werden können:

- Statisches Magnetfeld von 1,5 T und 3 T
- Maximaler räumlicher Feldgradient von 1700 Gauss/cm
- Maximale berichtete, spezifische gemittelte Ganzkörper-Absorptionsrate

(SAR) von 2 W/kg (Normalbetrieb). Unter den oben definierten Scan-Bedingungen soll das Rex PiezoImplant nach 15 Minuten kontinuierlichem Scannen einen maximalen Temperaturanstieg von weniger als 2,2 °C erzeugen. Bei nichtklinischen Tests erstreckt sich das durch das Gerät verursachte Bildartefakt ca. 16,2 mm vom Rex PiezoImplant aus, wenn es mit einer Gradienten-Echopulsfolge und einem 3 ,0T-MRT-System aufgenommen wird.



## Mögliche unerwünschte Ereignisse

Mögliche unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwendung von Zahnimplantaten können sein: Integrationsversagen; Integrationsreduktion; Wunddehiszenz, die ein Knochentransplantat erfordert; Kieferknochenbruch; Perforation der folgenden Punkte: Kieferhöhle, unterer Rand des Unterkiefers, labiale und linguale Knochenwände, Alveolarkanal und Gingiva; Abszesse, Fisteln, Eiterung, Entzündung, Radiotransparenz, anhaltende Schmerzen, Empfindlichkeitsreduktion, Parästhesie, Hyperplasie, übermäßige Knochenreduktion, die eine Operation erfordert, Implantatfraktur, systemische Infektionen, Nervenläsionen oder andere Nervenschäden sowie vaskuläre Läsionen oder Blutungen, die insbesondere bei Patienten, die sich einer Behandlung mit Antikoagulantien und/oder Antiaggregaten unterziehen, manchmal schwerwiegend sein können.

Bitte melden Sie Komplikationen wie Implantatbruch, Lockerung oder Infektion umgehend an Ihren Zahnarzt und auch an Rex Implants, indem Sie die Kontaktseite auf [www.reximplants.com](http://www.reximplants.com) aufrufen.

## Das PiezoImplant System

Das von Ihnen erhaltene PiezoImplant ist eine innovative und hochmoderne Lösung, die speziell für die orale Rekonstruktion dünner Restknochenkämme entwickelt wurde. Führen Sie bei Reisen diesen Pass als Nachweis Ihrer Behandlung mit sich.

Bevor Sie eine zusätzliche Zahnbehandlung erhalten, einschließlich für die Mundhygiene, zeigen Sie diesen Pass bei Ihrem Zahnarzt vor. Wir empfehlen Ihnen, einen Zahnarzt zu wählen, der eine spezielle Ausbildung für die Arbeit mit dem PiezoImplant System erhalten hat. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem Zahnarzt mit dieser Qualifikation wünschen, wenden Sie sich bitte an die Zentrale von Rex Implants.

Das PiezoImplant System besteht aus Zahnimplantaten aus Titanlegierung (ASTM F136), die in den Knochen eingesetzt werden, Abdeckschrauben zum Schutz des Implantats während der Heilung und verschiedenen anderen Komponenten, die es Ihrem Zahnarzt ermöglichen, Ihr Lächeln wiederherzustellen. Bitten Sie Ihren Zahnarzt um eine Kopie des chirurgischen Handbuch für Rex Implants, um zu verstehen, wie diese Implantate in die Mundhöhle eingesetzt werden.



**Rex Implants**  
 minimally invasive technology  
 PiezoImplant System

Rex Implants, Inc.  
 850 Michigan Avenue  
 Columbus OH  
 43215, USA

[www.reximplants.com](http://www.reximplants.com)

Für: Italiano, Deutsch,  
 Español, Français  
 besuchen Sie – [www.reximplants.com](http://www.reximplants.com)

PR-01 REV 2

**Details zur chirurgischen  
Behandlung**

Bitte das Patientenetikett aus der  
Implantatverpackung anbringen

<b>Implantatetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Implantatetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Implantatetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Implantatetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Implantatetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Implantatetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

**Details zur restaurativen  
Behandlung**

Bitte Patientenetikett beifügen  
aus dem Implantatpaket

<b>Restorationsetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Restorationsetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Restorationsetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Restorationsetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Restorationsetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

<b>Restorationsetikett</b>	
Zahnnummer	Datum

**Patientendaten**

Auf dieser Karte werden für Sie und Ihren Zahnarzt  
wichtige Informationen über Ihre Zahnbehandlung erfasst.  
Bringen Sie diese Karte zu allen Folgeterminen mit, um  
den langfristigen Erfolg Ihrer Implantate zu gewährleisten.

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Stadt/Bundesland: \_\_\_\_\_

Postleitzahl: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Anfangsdatum des chirurgischen Eingriffs:

Informationen für Zahnärzte	Informationen zum restaurativen Arzt
-----------------------------	--------------------------------------